

# MyPure-96Pro全自动核酸提取仪快速操作规程

## (96/192通量医院版)

示意图

### 设置流程

打开界面选择编辑需要运行的流程。


图一



### 打开舱门

握住左右把手向两侧打开舱门（如图二），根据流程设定来放置孔板（试剂盒）

图二

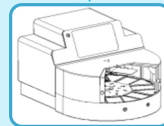

### 孔板放置

放置孔板时须注意其方向(缺口向内)


以192双提取为例：

- 样品板放到板位1、2
- 洗液1放到板位3、4
- 洗液2放到板位5、6
- 洗液板放置在板位7、8

96单提取：

- 样品板放到板位1
- 洗液1放到板位3
- 洗液2放到板位5
- 洗液板放置在板位7

图三

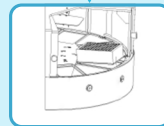


### 磁套放置

192提取：磁套插入提取系统1、2  
96提取：磁套插入提取系统1

（1、3、5、7为一组提取）  
（2、4、6、8为一组提取）


图四

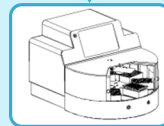

### 关闭舱门

握住仪器左右舱门把手，向中间关闭仪器舱门（如图五）

图五

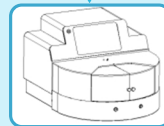



### 开始运行

主页面，选择程序组，选择程序已编辑好的程序，点“运行”

图六



注意事项：放置孔板和磁套时，按下转盘左转（顺时针）按钮“”或转盘右转（逆时针）按钮“”，直至需要的板位或孔板转至最外侧便于放置孔板或磁套。

**Surbiopure**<sup>®</sup>

售后服务热线：020-84783894